



Nowy interfejs użytkownika oraz nowe funkcjonalności!

Logowanie

Logowanie pozostaje bez zmian, wciąż używamy naszego loginu oraz hasła logując się na stronie test.moxo-adhd.pl

MOXO™

Welcome to MOXO

Email:

Password:

Login

[Forgot your password?](#)
[Don't have an account? Sign-up](#)

A new MOXO experience is here.

MOXO™ DIAGNOSIS
Easier navigation, intuitive account management, and a slick new design.

MOXO™ PROFILER NEW
A revolutionary new way of looking at human attention.

MOXO Diagnosis

Test #: G12410
Date: 24-01-2024 13:47:40 Test age: 13
Medication: None

Validity: Malingering

Norm Comparison in Z Score
A -0.78 T -0.68 I -5.29 H -2.47

John Albion
612417
13Y0M

Overview: Detailed
Diagnosis: Profiler

Performance: All

Performance: Attention

Distractor Impact

	A	I	T	H
Sustained performance	+	+	+	+
Visual	-	-	+	+
Auditory	-	-	+	+
Combined	-	-	+	+
Distraction load	-	-	-	-

Diagnosis summary

P B I S A M V D L R S C

John describes that he has a difficult time staying focused. Parental and teacher reports indicate disruptive behavior and a difficulty completing tasks. MOXO results indicate low impulsiveness and hyper-reactivity scores. Additionally, high distraction load is especially problematic, indicating that lots of visual and even more so auditory stimulation in the environment impacts on his ability to perform.

Status: Sound

Information processing


Selective attention Processing speed

Performance


Task persistence Processing speed stability

Menu boczne w oparciu o ikonki


Dotychczasowe menu górne znalazło swoje miejsce z lewego boku, na granatowym pasku:

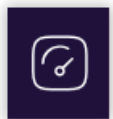


Ekran główny (na którym zobaczymy ilość Wykonanych testów, Saldo testów, Ostatnio dodanych badanych oraz Oczekujące na wykonanie testy)

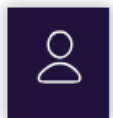

Badani (lista wszystkich badanych w bazie danych, dawniej *Pacjenci*)

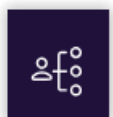


Użytkownicy (dawniej *Współpracownicy*)

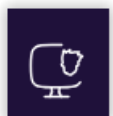


Testy (lista wszystkich wykonanych testów)



Baza wiedzy (dawnie centrum szkoleniowe)

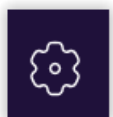

Mój profil (dane partnera Moxo)

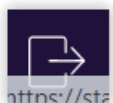

Wyloguj

Nawigacja na ekranach – podwójne kliknięcie otwiera z boku okienka informacyjne

Na różnych ekranach (przykładowo Badani lub Testy) elementy wiersza są aktywne (podświetlone na niebiesko) lub nieaktywne (szare). Podwójne kliknięcie w wiersz w obszarach nieaktywnych (na szaro) otworzy nam boczne okienko informacyjne. Kliknięcie w niebieski element aktywny przekieruje nas do nowego okienka ze szczegółami (przykładowo kliknięcie w numer lub nazwisko Badanego otworzy kartę z jego szczegółowymi danymi).

The screenshot displays the MOXO application interface. At the top left is the MOXO logo. At the top right, the user's name 'Mikołaj Kokot' and ID '#: 440259' are shown. A vertical sidebar on the left contains navigation icons. The main area is divided into two sections. The left section, titled 'Badani', features a search bar 'Szukaj wśród pacjentów' and a '+ Badany' button. Below is a table of patients with columns for '#', 'Nazwisko', 'Utworzono', 'Wiek', and 'Płeć'. The row for 'Zuzanna K' is highlighted in blue. The right section shows the detailed information for 'Zuzanna K', including her role as 'Właściciel', identification number, birth date (09-03-1994), email (zuzanna.kokot@gmail.com), phone number, city, region, country (Poland), language (Polski), and HMO. A blue circle highlights this information panel. At the bottom left, there is a pagination control showing 'Page 1 / 5' and a set of numbered buttons (1, 2, 3, 4, 5).

#	Nazwisko	Utworzono	Wiek	Płeć
2675662	Jarostaw Cz	28-03-2024 16:12	10	M
2639448	Miko Koko	05-03-2024 12:09	15	M
2403311	Jan Nowak	22-09-2023 06:57	9	M
2336956	bbb ccc	24-07-2023 07:45	7	M
2294085	Zuzanna K	14-06-2023 08:30	30	F
2282842	Mikołaj Kokot	05-06-2023 09:12	26	M
2048547	Adam Test10	26-11-2022 07:16	11	M
1405888	Mikołaj Kowlski	16-06-2020 04:32	12	M
1351882	test wawa null	03-02-2020 04:49	10	M
1332848	test Sr null	08-01-2020 14:28	10	M
1331702	test Latała null	07-01-2020 04:21	10	M
1326761	test Ch null	30-12-2019 03:00	12	M
1309921	jhhh null	06-12-2019 12:51	12	M

Kiedy na ekranie Testy podwójnie klikniemy w wiersz (w części szarej nieaktywnej), z boku otworzy nam się syntetyczny podgląd wyników. Możemy z niego łatwo przejść do szczegółów klikając w ikonki „oko” lub wydrukować standardowy raport klikając w ikonkę „drukarka”.

MOXO™ Mikołaj Kokot
#: 440259

Testy

#	Nazwisko	Data testu	Wiek testu	Płeć	Lek	Terapia	Status
2673820	Miko Koko	27-03-2024 17:26	15	M	None	None	Uruchom test
2659844	Miko Koko	18-03-2024 13:50	15	M	None	None	Uruchom test
2653281	Miko Koko	13-03-2024 18:31	15	M	None	None	Uruchom test
2639452	Miko Koko	05-03-2024 18:09	15	M	None	None	Uruchom test
2337169	Mikołaj Kokot	24-07-2023 15:45	25	M	None	Medical	Uruchom test
2294088	Zuzanna K	14-06-2023 14:30	29	F	None	None	Wyniki
2282845	Mikołaj Kokot	05-06-2023 15:12	25	M	None	None	Uruchom test
2263182	Adam Test10	19-05-2023 13:56	10	M	None	None	Uruchom test
2048571	Adam Test10	26-11-2022 13:33	9	M	None	None	Uruchom test
1521615	Mikołaj Kowlski	28-01-2021 15:14	9	M	None	None	Uruchom test
1405890	Mikołaj Kowlski	16-06-2020 10:33	8	M	None	None	Brak danych
1387329	test wawa null	27-04-2020 09:31	6	M	None	None	Uruchom test
1351889	test wawa null	03-02-2020 10:52	6	M	None	None	Brak danych

Page 1 / 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

2294088
Właściciel :
Utworzono 14-06-2023 14:30

Diagnosis Profiler

	A	T	I	H
Wynik Z	0.84	0.24	0.41	0.22

Nasilenie

Trafność **Symulowanie**

Raporty

Poglądowy: 👁

Szczegółowy: 👁

Wiek Uwagowy: 👁 🖨

Dodawanie nowego badanego oraz nowego testu

Nowego Badanego (dawniej Pacjenta) możemy dodać zarówno z ekranów głównego jak i z menu Badani klikając ikonkę **+ Badany**.

Ostatni badani

Nazwisko	Utworzono	Wiek	Płeć	Akcja
Jarosław Cz	28-03-2024	10	M	+ Test
Miko Koko	05-03-2024	15	M	+ Test
Jan Nowak	22-09-2023	9	M	+ Test
bbb ccc	24-07-2023	7	M	+ Test
Zuzanna K	14-06-2023	30	F	+ Test

Nowy Badany

Zapisz

Nazwisko:
Imię Nazwisko

Identyfikator:

Płeć: M F

Data urodzenia:

Email:

Numer telefonu:

Adres:
Miasto Stan/Region

Kraj:

Język:

Nowy test dodajemy w ekranie Badanego klikając na **+ Test**:

MOXO™ Mikołaj Kokot
#: 440259

Nazwisko:
Imię Nazwisko

Identyfikator:

Płeć: M F

Data urodzenia:

Język:

Numer telefonu:

Adres:
Miasto Stan/Region

Kraj:

Email:

Anuluj Zapisz

Jarosław Cz

#: 2675662
10Y/4m M
Utworzono: 28-03-2024 16:12
Właściciel:
Formularz Informacyjny Badanego

Ostatnio wykonane testy

#	Data testu	Wiek testu	Lek	Terapia	Status


+ Test

Wyniki zarówno w formie „poglądowej” jak i „szczegółowej”

Wyniki testu możemy zobaczyć klikając w **Wyniki** zarówno w menu Testy, jak na karcie Badanego. Możemy wybrać różne sposoby ich prezentacji (klikając w górnym prawym rogu) – mamy następujące widoki:

Poglądowy (przykładowe okienko poniżej) lub **Szczegółowy** (raport jak dotychczas)

Diagnosis (wsparcie diagnozy - raport jak dotychczas) lub **Profiler** (nowy raport!)

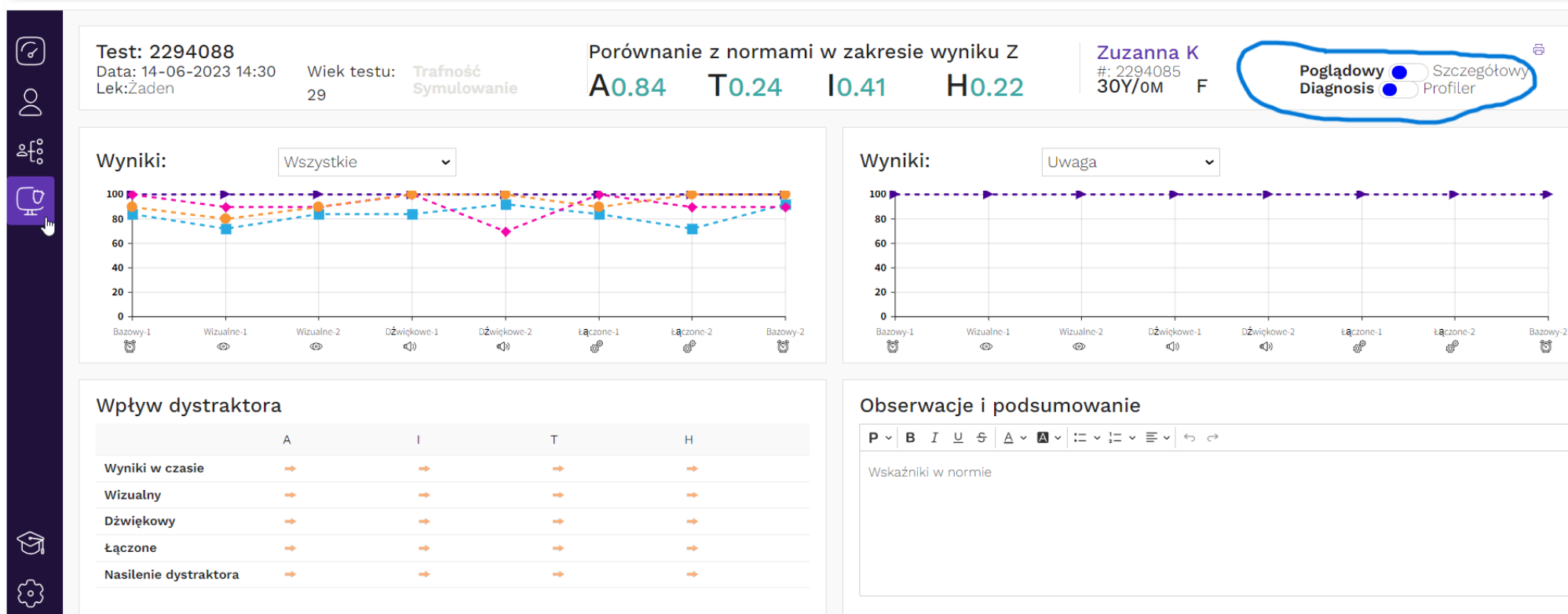

Powyżej przedstawiono widok poglądowego raportu diagnostycznego. Mamy tam podstawowe informacje o wynikach, jak porównanie z normami (górnny wiersz), wykresy wskaźników (dwa okienka prezentowane obok siebie pozwolą na porównywanie wykresów dla różnych wskaźników), wpływ dystraktorów, czy okienko edytowalne dla danych z obserwacji.

Wydruk pełnego raportu (jak dotychczas) lub jego **zapisanie** do PDF jest możliwe po kliknięciu w ikonkę drukarki w górnym prawym rogu.

Nowy wskaźnik informujący o ryzyku symulowania

Do ekranu z wynikami dodano nowy wskaźnik informujący o ewentualnym symulowaniu. Zatem obecnie mamy następujące wskaźniki:

- Trafność (jak dotychczas)

Wskaźnik ten informuje, czy Badany wykazał się poprawnym zaangażowaniem w wykonie testu (innymi słowy test bada, czy nie miał „nienaturalnych” przerw w klikaniu – jeśli miał, to oznaczałoby przykładowo „nieprawdziwe” błędy pominięcia, wynikające wyłącznie z niepoprawnego wykonywania testu, a zatem wyniki uzyskane w ten sposób byłyby niediagnostyczne).

- Symulowanie (nowy wskaźnik)

Wskaźnik symulowania informuje, czy dana osoba celowo próbowała udawać trudności w skupieniu uwagi celem osiągnięcia niejako zaplanowanych złych wyników.

Kolor szary obu wskaźników oznacza, że test nie wykrył nieprawidłowości. Kolory żółty i czerwony oznaczają, że wyniki są najprawdopodobniej niediagnostyczne i należy powtórzyć test.

Test: 2294088

Data: 14-06-2023 14:30

Lek: Żaden

Wiek testu:

29

Trafność
Symulowanie

Porównanie z normami w zakresie wyniku Z

A0.84

T0.24

I0.41

H0.22

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 609 302 202, kontakt@moxo-adhd.pl